

● Хирургия

Автоматическая ручка для лезвий скальпеля

СЕРИЯ
EASY



Автоматические ручки №3 для лезвий скальпеля, серия EASY

Автоматическая ручка №3 EASY круглая*

4607-1

↔ 15,5 см

Ø 7,85 мм



5 шт./упак.

EASY



Назначение: хирургия.

Общая длина 15,5 см.

Рукоятка Ø 7,85 мм.

Круглая прямая.


Поставляется комплектом

5 шт./упак.



Особенности и преимущества

- Максимальный уровень безопасности пользователя основан на бесконтактном способе утилизации лезвия при помощи пружинного механизма ручки.
- Упрощенные установка и снятие лезвий в сравнении с обычными ручками.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на кисть руки за счет оптимального соотношения размеров.

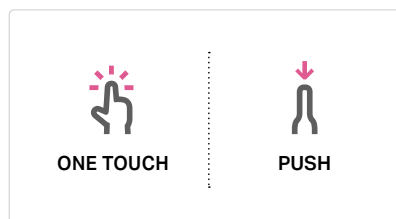

Выдвинутый шток удобен для быстрой установки и безопасного снятия лезвия скальпеля.



Шток, находящийся в рабочем положении, надежно удерживает лезвие скальпеля.




Фиксатор с крупным рифлением не проскальзывает при работе даже во влажных перчатках.

Порядок установки и смены лезвий на ручке EASY

Пружинный механизм ручки обеспечивает максимально простой способ установки и снятия лезвий.

Установка

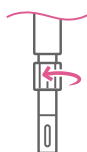

Открутите зажим.



Выдвиньте шток и установите лезвие.



Втяните шток и закрутите зажим.

Снятие и утилизация



Открутите зажим, выдвиньте шток и снимите лезвие.

Рекомендации по уходу за ручками №3 для лезвий скальпеля, серия EASY



Внимание!

Ознакомьтесь с рекомендациями по очистке, дезинфекции, стерилизации и хранению инструментов и приспособлений, размещенные на сайте karlfritz.ru и в каталоге продукции.




1. Разборка


Перед очисткой и дезинфекцией ручку EASY необходимо разобрать, как показано на схеме ниже.




- 1 Открутите стопорный винт в направлении против часовой стрелки.

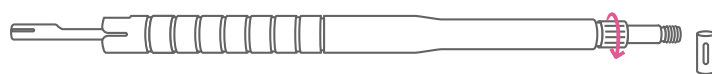

- 2 Открутите обжимную гайку в направлении против часовой стрелки.

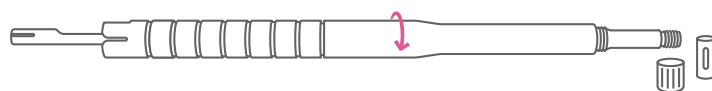

- 3 Открутите гладкую часть корпуса в направлении против часовой стрелки.

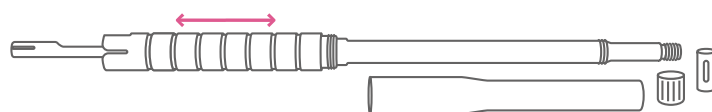

- 4 Подвижная пружинная рифленая рукоятка является неразборной. Для очистки и смазки ее можно сдвинуть в сторону.

2. Очистка и дезинфекция

При сильных загрязнениях используйте щетку с нейлоновой щетиной и иглу для очистки каналов турбинных и угловых наконечников.

Использование ультразвуковой ванны является более предпочтительным способом очистки и дезинфекции ручки EASY.

3. Промывка

Чтобы предотвратить образование пятен от воды на поверхности ручки EASY, при заключительной промывке следует применять деминерализованную воду.

4. Сушка

Использование сжатого воздуха является более предпочтительным способом сушки ручки EASY. Сжатый воздух позволяет полностью удалить влагу из неразборной части корпуса.

5. Обслуживание

Смазка ручки EASY специализированными маслами для шарнирных инструментов проводится по необходимости.

6. Сборка

Сборка производится в обратном порядке по отношению к разборке.

7. Стерилизация

Ручка EASY выдерживает стерилизацию паром под давлением в автоклаве при температуре от 132 до 134 °C в течение 15 минут с последующей сушкой в течение 30 минут.

* Представленная в буклете ручка зарегистрирована в России под названием «Ручка №3 EASY для лезвий скальпеля круглая прямая, арт. 4607-1 – 5 шт./уп.».



127254, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский,
проезд Огородный, д. 16/1, стр. 3, помещ. 1001
Тел.: + 7 (495) 118-76-20
Эл. почта: info@karlfritz.ru
www.karlfritz.ru

IMG GmbH

Товарный знак Karl Fritz® (свидетельство на товарный знак № 771529)
принадлежит АЙЭМДЖИГмбХ, Альтер Банхоф, 3, 58553 Халвер, Германия

Знакомьтесь с подробной
информацией о продукции
и делайте заказы на сайте

