

MICRO Bone Scraper

Скребок костный стоматологический

СЕРИЯ
EASY

● Аутокость

Особенности и преимущества

Минимальная инвазивность

Скребок KARL FRITZ® Micro Bone Scraper серии Easy обеспечивает минимальную инвазивность при заборе аутокостных фрагментов благодаря небольшим размерам лезвия и накопительной камеры.

Рукоятка с замком

Встроенный в рукоятке замок препятствует случайному открытию скребка во время работы.

Неограниченный срок годности

Костные скребки KARL FRITZ® Micro Bone Scraper серии Easy поставляются нестерильными, поэтому нет необходимости определять срок, по истечении которого они считаются непригодными для использования по назначению.



**NON
STERILE**

Скребок костный стоматологический Micro Bone Scraper*

3500-1

↔ 17 см

2 шт./упак.

EASY



Посмотрите
видеоматериалы
о продукции
KARL FRITZ®

Общая длина 17,0 см. Лезвие Ø5 мм.

Для забора аутокостных фрагментов в виде стружки.

Объем аутокостных фрагментов 0,25–0,5 см³.

Подготовка скребка к операции

- 1 Извлеките скребок из потребительской упаковки. Не используйте скребок, если упаковка повреждена, открыта или получила загрязнения.
- 2 Проведите визуальный осмотр инструмента на наличие дефектов.
- 3 Проведите стерилизацию паром в автоклаве при температуре 134 °C в течение 15 минут с последующей сушкой в течение 30 минут.



Внимание!

Поставляются нестерильными.

Перед применением необходимо простерилизовать.




Порядок применения

- 1 Скребок должен контактировать только со стерильными поверхностями.
- 2 Установите лезвие на поверхность кортикальной кости так, чтобы вход в накопительную камеру был обращен к костной ткани, затем произведите забор аутокостных фрагментов, двигая скребок в сторону рукоятки.
- 3 Для извлечения аутокостных фрагментов, поверните рукоятку скребка против часовой стрелки — лезвие скребка повернется вместе с рукояткой, затем сдвиньте лезвие скребка рукояткой вперед из накопительной камеры и извлеките аутокостные фрагменты.



Процесс забора
аутокостных фрагментов

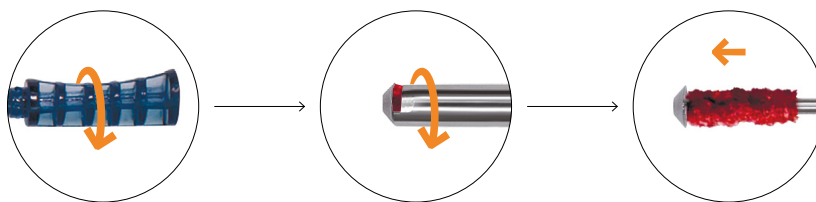

Порядок извлечения аутокостных фрагментов из накопительной камеры



Внимание!

Повторное применение скребка KARL FRITZ® Micro Bone Scraper серии Easy для последующих операций категорически недопустимо.

*Зарегистрирован в России как «Скребок костный стоматологический Karl Fritz® Micro Bone Scraper, арт. 3500-1 – 2 шт./уп.».

